

# Maxi Pro

## Trådløst Hørselshjelpemiddel

BE2021-C



### Egenskaper

#### Samtaleforsterkning

Hør hva som sies rundt bordet uten anstrengelser

#### Telefonforsterkning

Snakk i mobilen uten at det er behov for å gjenta hva som sies

#### Lett å bruke

Robust og ergonomisk design med gripevennlig materiale

#### TV-lytting

Se på ditt favoritt TV-program utan å forstyrre andre

MD

CE-merket medisinsk enhet i henhold til EU MDR 2017/745

# Oppdag gleden av å høre bedre

Maxi Pro hjelper deg å delta uten problemer i samtaler med dine kjære. Den løfter fram ordene slik at du hører dem klart og tydelig. Det betyr at du ikke trenger å anstrenge deg så mye for å høre.

Men Maxi Pro kan mye mer enn så. Kobl den til ditt TV-apparat og stil lyden som du ønsker, eller bruk den for å forsterke lyden fra mobiltelefon. Med Maxi Pro behøver du ikke å være urolig for å gå glipp av noe.

Maxi Pro er laget i et gripevennlig materiale og ligger godt i hånden eller på bordet. Den har store knapper med tydelige symboler og er et bra alternativ for deg som skjelver litt på hånden eller opplever at du ser dårlig av og til.



Qualcomm aptX low latency



# Teknisk informasjon


## Mål og vekt

Høyde: 140 mm  
Bredde: 45 mm

Dybde: 27 mm  
Vekt: 127 g



## Knapper og kontroller

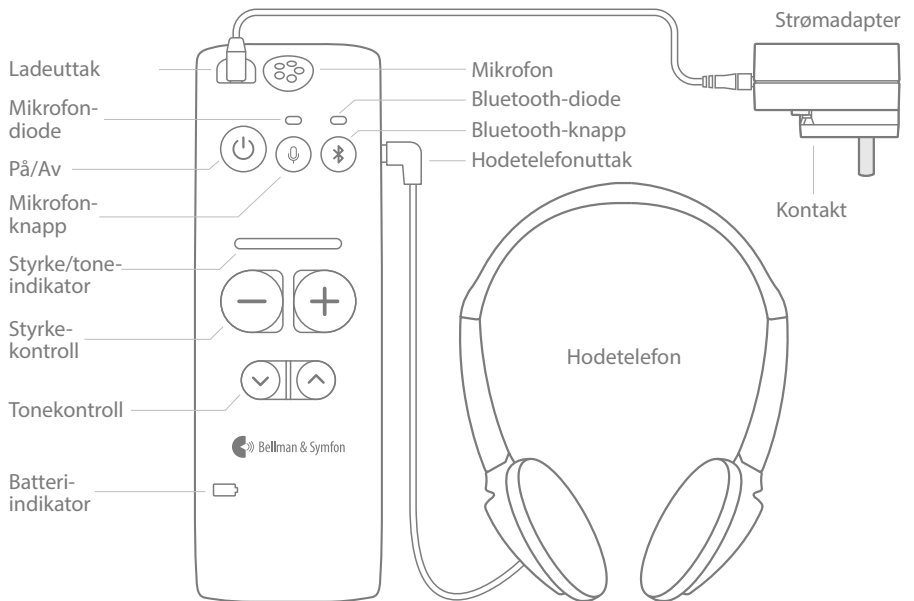

## Egenskaper

- **Digital lyd**  
Klart og naturlig tale med minimal forsinkelse og ingen forvrengning.
- **Qualcomm® aptX™ LL**  
Tilkobles mobiltelefonen og TV via Maxi Pro TV-sender.
- **Lett å bruke**  
Ergonomisk design med store taktile knapper, mykt gripevennlig materiale og kraftige LED indikatorer. Ideell for personer med nedsatt sanselig følelse eller syn.
- **Høreapparatvennlig**  
Fungerer med alle høreapparater med telespole. (Krever tillbehør, halsslynge BE9159-P02)

## Strøm og batteri

- Batteri: 2 x 3.7V 750 mAh Li-on
- Driftstid: Opp til 70 tim
- Strømforbruk: 18 mA

## Frekvens og rekkevidde

- Bluetooth-frekvens: 2402 – 2483,5 MHz
- Rekkevidde: Opp til 25 m, fri sikt.
- Teknologi: Qualcomm® aptX™ Low Latency

## Tilkoblinger

- Hodetelefonuttak: 3.5 mm mini-stereo
- Ladeuttak: 2.5 mm kontakt, DC 5V, 1.0 A

## Omgivelser

- Driftstemperatur: 0 til 35 °C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 90% (ikke kondenserende)

## Utganger


- **Utnivå med BE9229-P02 Hodetelefoner med Mikrofon**  
135dB @ 1kHz (SPL90)  
136dB (HF Ave. SPL90)  
Forsterkning ved full styrke: 49dB @ 1kHz  
Referensforsterkning: 49dB @ 1kHz (SPL70)
- **Utnivå med BE9233-P02 Øretelefoner med mikrofon**  
122dB @ 1kHz (SPL90)  
127dB (HF Ave. SPL90)  
Forsterkning ved full styrke: 36dB @ 1kHz  
Referensforsterkning: 36dB @ 1kHz (SPL70)
- **Mikrofon SNR**  
53dB @ 1kHz 1% THD
- **Forvrengning**  
0.2% THD @ 1kHz – 6dB @ 1% THD (Mik elektrisk)
- **Bluetooth SNR**  
85dB @ 1kHz 1%THD (BT med TV-sender)
- **Frekvensrespons**  
20Hz – 8kHz (Mic), 20Hz – 20kHz (Bluetooth)
- **Uteffekt**  
Maks 82mW @ 1kHz / 16 Ω (THD=1%)

## Vedlikehold og rengjøring

- For å gjøre rent produktet, koble ut strømledningen og alle andre kabler. Bruk en myk, lofri klut. Unngå å få fuktighet i åpningene.
- Ikke bruk vaskemidler, aerosolspray, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller skuremidler.

## I esken

- BE2021-C Maxi Pro Trådløst Hørselshjelpemiddel
- BE9233-P02 Øretelefoner med mikrofon, svart
- BE9135 Nøkkelbånd
- BE9254 Ladekabel USB, hvit
- Strømadapter, hvit
- Plugg til strømadapter, hvit
- Bruksanvisning

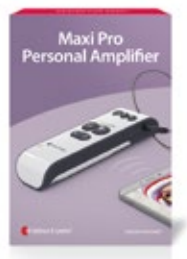

## Tillbehør

- BE9229-P02 Hodetelefoner med Mikrofon, svart
- BE9159-P02 Halsslynge, lang kabel, svart
- BE9161-P02 Halsslynge, kort kabel, svart
- BE2022 Maxi Pro TV sender
- BE9147 Reiseetui

## Godkjenninger



Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

© og TM 2025 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE2021-C\_048DSH1.0\_NO

[bellman.com](http://bellman.com)