

Tråkkematte

BE9026-P02



Egenskaper

Støvtett

Oppfyller IP66 beskyttelsesklasse

Robust og holdbar

Kan brukes i -15 til 65 °C

Kompatibel med Visit

Fungerer med Visitsystemet

MD

CE-merket medisinsk enhet i
henhold til EU MDR 2017/745

Hold styr på alle som kommer og går.

Tråkkematten fra Bellman & Symfon er spesielt utviklet for Visitsystemets løsninger for smarte hjem. Plasser tråkkematten ved ytterdøren eller ved sengen for å få vite når noen beveger seg i ditt hus.

Tråkkematten er laget for å klare daglig slitasje. Den er helt stømtett og vedlikeholdsfri. Koble den til en Visit telefonsender for å få vite når noen kommer inn i et rom eller forlater sengen.

Bruk

Tråkkematten er mege følsom og kan brukes for å få vite, for eksempel, når:

- Noen går inn eller ut av et rom.
- Noen står opp fra sengen.
- En kunde kommer inn i butikken.


Du kan også bruke den får å "overvåke" barnerommet. Koble den til Visit babymonitor få å få vite når barnet krabber ut av krybben.



Teknisk informasjon




Slik kommer du i gang

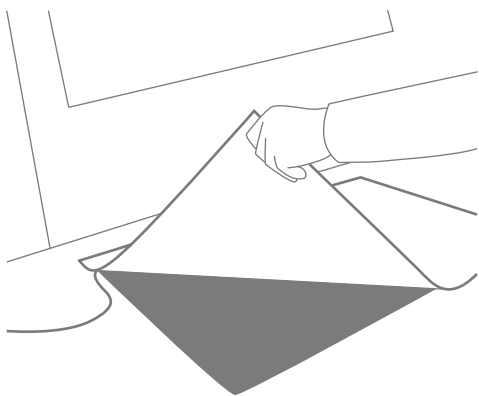


1. Plasser matten på en slett underlag og fest ledningene på veggen eller listen.

Dekk tråkkematten med en dørmatte for å beskytte den fra slitasje og unngå sklifare.

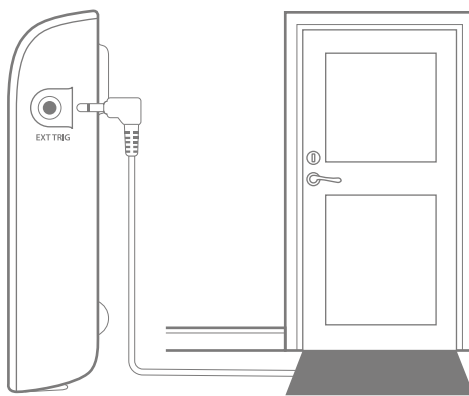

2. Koble matten til den eksterne uttaket på din Visitsender.

Plasser matten så nær senderen som mulig. Påse at ledningen sitter ordentlig i veggen eller listen for og hindre risiko for å snuble i ledningen.

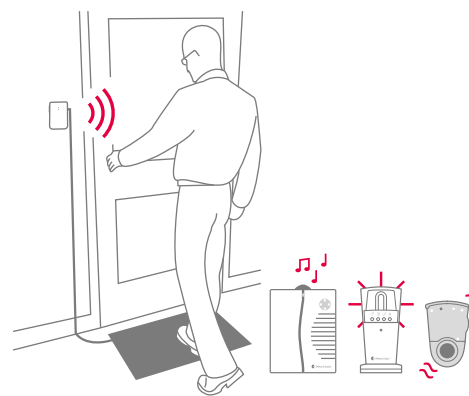

3. Tråkk på matten for å teste installasjonen.

Når kontaktmatten kjenner et trykk, aktiverer den senderen som varsler din Visitmottaker. Mottakeren varsler med lyd, blits eller vibrasjoner (avhengig av type mottaker).

Mål og vekt

Høyde: **395 mm**

Bredde: **540 mm**


Dybde: **4.6 mm**

Vekt: **290 g**

Kabel: **200 cm**



Skjematisk bilde

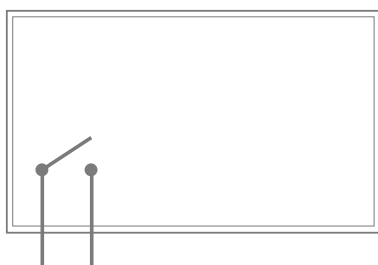

Funksjoner

- Kontakt: N/O normalt åpent
- Kontaktmotstand: Normalt 1 Ω (avhengig av trykk)
- Normalt trykk: >5 kg over en skive med diameter 50 mm

Omgivelser

- Driftstemperatur: -15 til 65 °C
- Innvirkning: Støvtett og oppfyller IP65 beskyttelsesklasse (ikke vanntett)

Maksklassifisering

- Kontaktspenning: Maks 10 VA
- Tilkoblingsspenning: Maks 25 VDC
- Variabel strøm: Maks 0,25 A DC resistiv
- Maksimal strøm: 0,25 A DC resistiv

Advarsler

- Tråkkematten kan ikke brukes i sikkerhetsrelaterte situasjoner.
- Det er viktig dekke matten for å unngå sklifare og hard slitasje.
- Unngå å trække direkte på tråkkemattens koblinger. Ikke dra hardt i ledningene.

Godkjenninger



Dette produktet er en medisinsk enhet i samsvar med forordning (EU) 2017/745 (forordningen om medisinsk utstyr).

© 2025, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjon i dette databladet kan endres uten varsel.

BE9026-P02_001DSH1.0-NO

bellman.com